


((((MaxIT)))



Manual de Instrucciones

Características del bucle inductivo MaxIT Wireless

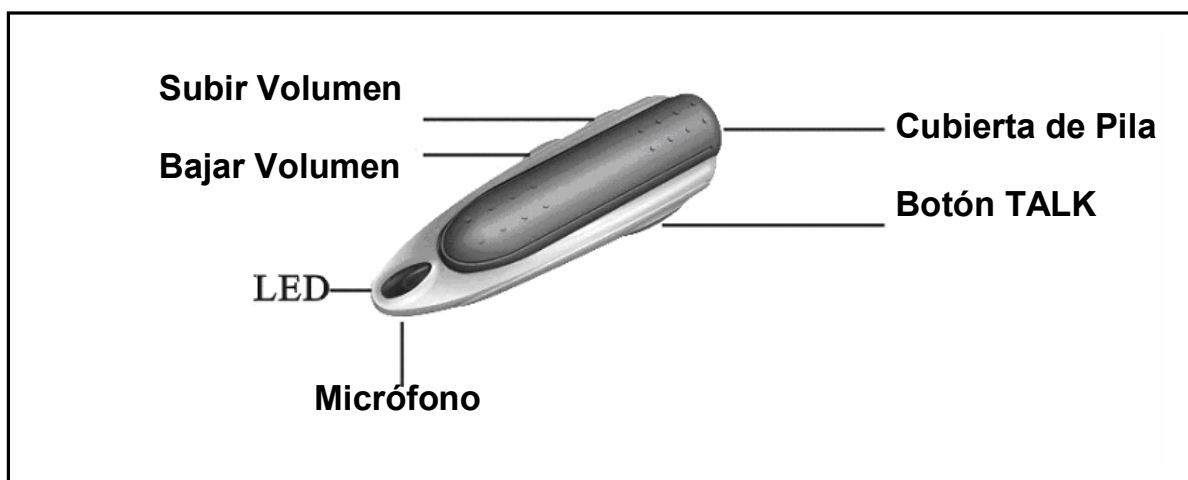

1) Introducción

Su MaxIT[®] Wireless Inductive Loopset es un ligero dispositivo que utiliza la tecnología de conectividad inalámbrica Bluetooth[®]

Proporciona una conectividad “manos-libres” de su audífono con cualquier dispositivo Bluetooth[®] por medio de la bobina telefónica de su audífono cuando trabaja en posición ‘T’ (‘T switch’).

Se alimenta con una pila tipo AAA (recargable o alcalina).

Cualquier teléfono móvil que usted utilice con MaxIT debe tener la conectividad Bluetooth activada y ser compatible con Bluetooth version 1.2/2.0. El teléfono móvil debe además admitir los mismos perfiles que MaxIT.

El bucle MaxIT se lleva alrededor del cuello como si se tratara de un collar.

2) Contenido de la caja original

MaxIT Wireless Inductive Loopset
2 pilas AAA recargables
Cargador USB
Cargador adaptado para automóviles.
Cubridor del portapilas
Manual de usuario

3) Requisitos del sistema

Sólo son necesarios 3 requisitos para un correcto funcionamiento:

- Llevar puesto correctamente el bucle MaxIT.
- Tener activada la conexión Bluetooth de su teléfono móvil.
- Que su audífono disponga de Bobina telefónica ('posición T').

4) Cargando la pila AAA

- a) Coloque la pila en el cargador asegurándose de que la polaridad es la correcta de acuerdo con las marcas.
- b) Conecte el cargador a un puerto USB libre de su ordenador mientras este permanezca encendido. Mientras la pila se encuentre "en carga" la luz **ROJA** permanecerá encendida. Cuando la pila esté completamente cargada la luz se apagará.

5) Colocación de la pila en el dispositivo.

- a) Abra la cubierta de la pila deslizando la tapa de color negro en la que se puede leer 'Bluetooth' en dirección al LED. Levante ahora la cubierta.
- b) Introduzca la pila en el dispositivo asegurándose de que la polaridad es la correcta y concuerda con las marcas.
- c) Coloque la cubierta siguiendo el proceso a) pero a la inversa.

IMPORTANTE:

Asegúrese de que la nueva pila está completamente cargada, si no es así podría acortar la vida útil de esta haciéndola trabajar a media carga.

6) Proceso de Conexión inicial

- a) Active la función Bluetooth de su teléfono móvil.
- b) Busque en el menú de su teléfono ‘ajustes Bluetooth’, y seleccione en visibilidad: ‘Visible para todos’.
- c) Mantenga pulsado el botón aproximadamente 7 segundos hasta que el LED destellee alternando entre los colores **AMARILLO** y **ROJO** indicando que el dispositivo se encuentra “en enlace”.
- d) Dentro del menú Bluetooth de su móvil, seleccione la opción ‘Buscar dispositivos Bluetooth’.
- e) Una vez que el teléfono ha encontrado el dispositivo ‘MA007’ seleccione ‘enlazar’ y entonces le pedirá una contraseña, introduzca ‘0000’.
- f) Si su teléfono ofrece la opción: ‘PERMITIR QUE ESTE DISPOSITIVO SE CONECTE AUTOMÁTICAMENTE?’ seleccione ‘Sí’.

- g) El teléfono le confirmará que 'MA007' está enlazado y aparecerá la opción 'CONECTAR'. Seleccione 'CONNECT'.
- h) Una vez el teléfono indique que está enlazado & conectado, salga del menú Bluetooth y vuelva la posición principal. Ahora aparecerá el icono Bluetooth.
- i) Si el enlace no se produce correctamente, apague el teléfono y el MaxIT, espere 10 segundos y repita los pasos desde a) hasta h) de nuevo.
- j) Si el enlace aún no se produce correctamente, apague MaxIT, borre todos los dispositivos enlazados de su teléfono y repita los pasos desde a) hasta h) de nuevo.

7) Proceso de conexión (después de un enlace inicial correcto)

Presione y deje unos segundos apretado el botón TALK hasta que el LED destellee en **AMARILLO** y entonces suéltelo. Si su teléfono se conecta automáticamente como en el paso f) del apartado 6, su bucle MaxIT se conectará automáticamente con su teléfono móvil; si no es así presione el botón 'TALK' una vez durante unos segundos para enlazarlo con su teléfono.

NOTA: *el proceso de enlace & conexión inicial y los siguientes podría variar dependiendo del fabricante y modelo de su teléfono móvil. Por favor consulte las instrucciones específicas de su teléfono si no consigue conectar su aparato después de seguir los pasos de los apartados 6 y 7.*

8) Apagado del bucle MAXIT

Para apagar su MaxIT, mantenga presionado el botón TALK hasta que el LED destellee en **ROJO**. Suelte el botón y su MaxIt quedará apagado.

9) Contestar a una llamada

Para contestar una llamada entrante, presione el botón TALK de su dispositivo. (Si su teléfono móvil dispone de la opción de ‘descolgado automático’ (auto-answer) y la opción está correctamente configurada, su bucle MaxIT recibirá la llamada automáticamente. En este caso no es necesario presionar el botón TALK).

10) Llamadas con su MaxIT mediante marcación por voz

- a) La función de ‘marcación por voz’ debe estar activada en su teléfono y las etiquetas de voz ‘voice tags’ almacenadas correctamente.
- b) En su bucle MaxIT, presione el botón TALK una vez.
- c) Un tono le avisará que puede ahora decir una ‘voice tag’ que haya sido guardada previamente en su agenda de ‘marcación por voz’
- d) El teléfono ahora marcará automáticamente el número de su contacto. En la mayoría de móviles usted podrá visualizar los detalles de la llamada en su pantalla.
- e) Cuando reciban su llamada podrá usted comunicarse mediante MaxIT.

11) Llamando desde el teclado

- a) Utilice el teclado para introducir el número o busque su contacto en la agenda.
- b) Para llamar, presione la tecla de llamada.
- c) La llamada será transferida automáticamente a su dispositivo MaxIT.

12) Colgar desde MaxIT

Para acabar una llamada presione el botón TALK.

NOTA: Esta opción sólo funciona en teléfonos que dispongan de perfil “manos-libres”.

Usted puede acabar su llamada mediante el teclado de su teléfono móvil igualmente.

13) Rellamada

Cuando su bucle se encuentra en posición de standby (sin estar en conversación), mantenga presionado el botón BAJAR VOLUMEN. El teléfono marcará ahora el último número al que ha llamado.

NOTA: Esta opción sólo funciona en teléfonos que dispongan de perfil “manos-libres”.

14) Control de volumen

Su bucle MaxIT tiene 9 pasos de volumen predefinidos. Los controles de SUBIR y BAJAR VOLUMEN se utilizan para aumentar o disminuir el volumen que enviará MaxIT a sus audífonos. Estos botones funcionan incrementando o disminuyendo los valores del volumen de 1 en 1. Manteniendo presionado el botón SUBIR VOLUMEN NO aumentará hasta el máximo nivel, solamente tendrá un incremento. El botón de BAJAR VOLUMEN trabaja de una manera similar sólo que al mantener pulsado este botón activa la función de “Rellamada” (véase apartado 13).

Para aumentar el volumen del micrófono de MaxIT por el que usted habla, deberá aumentar el ‘volumen de llamada’ en su teléfono móvil.

NOTA: Estos controles SÓLO modifican la relación de volumen entre el bucle y el teléfono y la salida hacia su audífono. No podrá ajustar el volumen propio de sus ayudas auditivas. Si usted experimenta problemas con el volumen de su audífono, por favor visite a su audioprotesista para ajustar el programa de ‘bobina telefónica’.

15) Modo AHORRO

Si su bucle se encuentra fuera del alcance de su teléfono móvil durante un periodo de tiempo, MaxIT entrará en modo “Ahorro” y se apagará conservando así la carga de su pila. Para reestablecer la conexión, vuelva a colocar su teléfono dentro del alcance de MaxIT y apriete el botón TALK

16) Estado de la batería y aviso de batería baja.

Cada vez que enciende su dispositivo, el LED mostrará la carga de su pila.

- a) En condiciones normales el LED destellea en **AMARILLO** cada 5 segundos.
- b) Cuando la batería baja el LED destellea en **ROJO** cada 5 segundos.
- c) La pila deberá ser recargada o sustituida cuando usted escuche un tono de alerta cada 20 segundos. Una vez que escuche este tono de alerta tendrá menos de 30 minutos para sustituir su pila antes de que MaxIT deje de funcionar.

17) Cuidades de MaxIT

- a) Guarde siempre MaxIT en un lugar seguro.
- b) Evite las altas temperaturas (sobre los 60° C) como en vehículos calientes o en contacto directo con el sol. Las altas temperaturas pueden causar desperfectos en cuanto a su funcionamiento y acortar la vida útil de sus pilas.
- c) No exponga MaxIT ni sus accesorios al agua u otros líquidos.

Especificaciones del MaxIT Wireless Inductive Loopset

Compatible con dispositivos Bluetooth versión 1.2/2.0

Distancia máxima de conexión: 10 metros

Peso: 11.5g sin pila

Peso: AAA 9g-12g (depending upon battery brand)

Duración de la pila en Standby: 500 horas

Duración de la pila en conversación: 15 horas

NOTA: La duración en reposo y conversación han sido comprobadas con pilas alcalinas AAA (900mA). El uso de pilas diferentes podría afectar a la duración tanto en standby como en conversación. También el uso de diferentes teléfonos móviles podría hacer que varíen estos datos.

MaxIT es distribuido para
España y Portugal por:



medical equipment design

Información de contacto:

Med Medical Equipment Design

Tel./Fax: +34 609 59 37 51 / 91 686 85 46
E-mail: info@medsgn.com
Web: www.medsgn.com
www.maxit.com.hk

(((MaxIT)))
SOLUTIONS FOR THE HARD OF HEARING